

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ГИЛАЙС

GILAYS

Стерильно, УВЛАЖНЯЮЩИЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ РАСТВОР С НАТРИЯ ГИАЛУРОНАТОМ 0,4%

10 мл во флаконе

Состав: гиалуронат натрия 0,4%, натрия фосфат двузамещенный додекагидрат, натрия фосфат однозамещенный, натрия хлорид, вода.

Как упаковано препарат?

ГИЛАЙС® - стерильный офтальмологический раствор. В упаковке содержится один флакон 10 мл, является эквивалентом для более чем 250 капель, флакон оснащен инновационным запатентованным многодозовых офтальмологическим дозатором нажимного типа (OSD), без консервантов.

OSD защищает раствор от попадания потенциально вредных бактерий, раствор остается стерильным в течение 120 дней после первого использования.

Что собой представляет ГИЛАЙС®?

ГИЛАЙС® - 0,4% офтальмологический раствор гиалуроната натрия высокой молекулярной массы, продукт биотехнологического синтеза. Гиалуронат натрия имеет мукомиметични, мукоадгезивни и вязкоупругие свойства, благодаря чему улучшает стабильность слезной пленки и обеспечивает комфорт поверхности глаза - смазка, увлажнение и защиту.

Когда следует применять ГИЛАЙС®?

Увлажняющие и защитные свойства гиалуроната способствуют устранению раздражения, сухость, жжение и постороннего предмета в глазах из-за влияния окружающей среды, а именно, ветра, солнца, сухого воздуха, соленой воды, дыма, слишком яркого света, кондиционированного воздуха, отопления, длительной работы за компьютером, или, в случае хирургической операции на глазах, конъюнктивит или частого или длительного пользования контактными линзами.

Сколько и как следует применять ГИЛАЙС®?

По 1 капле в глаз 2-3 раза в сутки, при необходимости.

Закапывать одну каплю в глаза, несильно сжимая флакон.

Меры предосторожности и предостережения


- Не использовать в случае повреждения флакона.
- Не использовать в случае воздействия четвертичных соединений аммония.
- Не использовать в случае чувствительности к любому из компонентов.
- Не использовать после истечения срока годности, указанного на флаконе и на внешней упаковке.
- Не касаться поверхности глаза наконечником флакона.
- После применения в редких случаях возможна незначительная кратковременная нечеткость зрения, обусловленная вязкостью раствора. С учетом этого, рекомендуется подождать несколько секунд до начала деятельности, требующей четкости зрения.
- Интервал до закапывания любого другого офтальмологического средства для наружного применения должен составлять по крайней мере 10 - 15 минут.
- Срок годности после вскрытия флакона - 120 дней.
- После завершения использования флакон следует утилизировать должным образом.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не глотать.
- Медицинский изделие предназначено исключительно для офтальмологического применения.
- Хранить при комнатной температуре.
- Медицинский изделие, как правило, предназначен для постоянного применения в течение не более 30 дней если симптомы сохраняются, следует проконсультироваться с врачом.
- Медицинский изделие содержит фосфаты. У некоторых пациентов с сильно поврежденной роговицей в редких случаях наблюдалось явление кальцификации роговицы при применении капель глазных с содержанием фосфатов; следовательно, не рекомендуется применение в терапии пациентов со значительным повреждением поверхности роговицы (например, с сильной эрозией или язвой роговицы).

Производитель:

Энтис С.р.л., Виа Луиджи Рацца 3, 20124 Милан, Италия (NTC S.r.l., Via Luigi Razza 3, 20124 Milan, Italy)

Уполномоченный представитель в Украине:

АО «Киевский витаминный завод», Украина, 04073, г. Киев, ул. Копылевская, 38

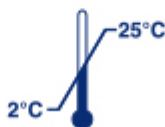

Дата последнего просмотра: 09/2019

