

# ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

## ГЛАЙС®

ГЛАЙС®  
GILAYS

### **СТЕРИЛЬНИЙ, ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ РОЗЧИН З ГІАЛУРОНАТОМ НАТРІЮ 0,4 %**

10 мл у флаконі

**Склад:** Гіалуронат натрію 0,4 %, натрію фосфат двозаміщений додекагідрат, натрію фосфат однозаміщений, натрію хлорид, вода.

#### **Як упаковано препарат?**

ГЛАЙС® - стерильний офтальмологічний розчин. В упаковці міститься один флакон 10 мл, що є еквівалентом для більш ніж 250 крапель, флакон оснащено інноваційним патентованим багатодозовим офтальмологічним дозатором натискного типу (OSD), без консервантів.

OSD захищає розчин від потрапляння потенційно шкідливих бактерій, розчин залишається стерильним протягом 120 днів після першого використання.

#### **Що собою являє ГЛАЙС®?**

ГЛАЙС® - 0,4 % офтальмологічний розчин гіалуронату натрію високої молекулярної маси, продукт біотехнологічного синтезу. Гіалуронат натрію має мукоімітетичні, мукоадгезивні та в'язкопружні властивості, завдяки чому покращує стабільність сльозової плівки та забезпечує комфорт поверхні ока - змащення, зволоження та захист.

#### **Коли слід застосовувати ГЛАЙС®?**

Зволожуючі та захисні властивості гіалуронату сприяють усуненню подразнення, відчуття сухості, печіння та стороннього предмету в очах через вплив навколишнього середовища, а саме, вітру, сонця, сухого повітря, солоної води, диму, занадто яскравого світла, кондиціонованого повітря, опалення, тривалої роботи за комп'ютером, або, у випадку хірургічної операції на очах, кон'юнктивіту чи частого або тривалого користування контактними лінзами.

## **Скільки та як слід застосовувати ГЛАЙС®?**

По 1 краплі в око 2-3 рази на добу, за потребою.

Закапувати одну краплю в око, несильно стискаючи флакон.

### **Заходи перестороги та застереження**

- Не використовувати у випадку пошкодження флакона.
- Не використовувати у випадку впливу четвертинних сполук амонію.
- Не використовувати у випадку чутливості до будь-якого з компонентів.
- Не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеної на флаконі і на зовнішній упаковці.
- Не торкатись поверхні ока наконечником флакона.
- Після застосування у рідкісних випадках можлива незначна короткотривала нечіткість зору, зумовлена в'язкістю розчину. З урахуванням цього, рекомендовано почекати кілька секунд до початку діяльності, яка потребує чіткості зору.
- Інтервал до закапування будь-якого іншого офтальмологічного засобу для зовнішнього застосування повинен становити, принаймні, 10 - 15 хвилин.
- Термін придатності після розкриття флакона - 120 днів.
- Після завершення використання флакон слід утилізувати належним чином.
- Зберігати в недоступному для дітей місці.
- Не ковтати.
- Медичний виріб призначений виключно для офтальмологічного застосування.
- Зберігати при кімнатній температурі.
- Медичний виріб, як правило, призначений для постійного застосування протягом не більше 30 днів; якщо симптоми зберігаються, слід проконсультуватись з лікарем.
- Медичний виріб містить фосфати. У деяких пацієнтів із сильно ушкодженою рогівкою в рідкісних випадках спостерігалось явище кальцифікації рогівки при застосуванні крапель очних з вмістом фосфатів; отже, не рекомендоване застосування в терапії пацієнтів із значним ушкодженням поверхні рогівки (наприклад, з сильною ерозією або виразкою рогівки).

### **Виробник:**


EnTiCi S.p.a., Via Луїджі Рацца 3, 20124 Мілан, Італія (NTC S.r.l., Via Luigi Razza 3, 20124 Milan, Italy)

**Уповноважений представник в Україні:**

АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна, 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38



NTC srl  
via L. Razza, 3  
20124 Milan  
ITALY

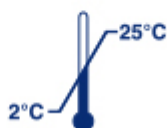

*Дата останнього перегляду: 09/2019*

