

# ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

## ГЛАЙС® КЕА

**ГЛАЙС® КЕА** – це офтальмологічна ізотонічна мазь з натрію гіалуронатом 0,4 %. Цей медичний виріб допомагає підтримувати зволоженість і захищати поверхню ока за допомогою захисної плівки.

### Що таке ГЛАЙС® КЕА?

Туба ГЛАЙС® КЕА містить 5 г стерильної офтальмологічної ізотонічної мазі, у складі якої міститься натрію гіалуронат, натрію хлорид, олія вазелінова, вазелін, калію фосфат одноосновний, калію сорбат, динатрію фосфат, ланоліновий спирт, вода і гідроксиметилгліцинат. В'язка структура ГЛАЙС® КЕА забезпечує тривале утримання на поверхні ока та зволоження та захисну дію навіть під час сну.

### Коли слід застосовувати ГЛАЙС® КЕА?

ГЛАЙС® КЕА – це стерильна офтальмологічна ізотонічна мазь, призначена для полегшення синдрому «сухого ока» під час сну та симптомів лагофтальму. Склад мазі забезпечує утримання на поверхні ока, а натрію гіалуронат утворює захисну плівку на поверхні рогівки, що забезпечує захист і зволоження. Натрію гіалуронат складається з вуглеводневих ланцюгів, які розподіляються по поверхні рогівки та утворюють структуру, здатну захоплювати молекули води. Завдяки цій властивості мазь зволожує та захищає поверхню ока. ГЛАЙС® КЕА покращує зволоження та змащення поверхні ока у випадку сухості, відчуття печіння чи втоми очей, викликаних, наприклад, тривалим переглядом телевізора чи тривалим впливом відеодисплея або повітря, що надходить від систем опалення та кондиціонерів. ГЛАЙС® КЕА захищає поверхню рогівки ока та уповільнює випаровування слізної плівки у пацієнтів, які страждають нічним лагофтальмом, полегшуючи такі типові симптоми, як сухість, відчуття печіння, відчуття стороннього тіла в оці.

### Як застосовувати ГЛАЙС® КЕА:

- Перед застосуванням ГЛАЙС® КЕА необхідно вимити руки.
- Відкриваючи ГЛАЙС® КЕА, не використовуйте першу дозу мазі, яка може бути водянистою, поки мазь не вийде з туби.
- Нахиліть голову трохи назад і відтягніть нижню повіку донизу, щоб утворити «кишеню».
- Тримайте тубу вертикально в напрямку до ока.
- Обережно натисніть на тубу, щоб вивільнити невелику порцію ГЛАЙС® КЕА в око. Повторіть процедуру на другому оці.
- Наносьте невелику порцію мазі, бажано перед сном.
- Якщо потрібна додаткова добова доза, наносьте невелику кількість мазі кожних три-чотири години або відповідно до вказівок лікаря.
- Не торкайтеся кінчиком туби до ока чи пальців.
- Після застосування ретельно закрийте тубу кришкою.

## Застереження:

- Не застосовуйте ГІЛАЙС® КЕА у випадку відомої підвищеної чутливості чи алергії на будь-який із компонентів продукту.
- У випадку подразнення очей припиніть застосування ГІЛАЙС® КЕА та проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
- Після нанесення мазі може виникати відчуття стороннього тіла в оці, яке минає, якщо покліпати очима.
- Не використовуйте продукт при пошкодженні упаковки.
- Не використовуйте продукт після закінчення терміну придатності.
- Мазь необхідно використати протягом 8 тижнів після першого відкриття упаковки.
- Зберігати подалі від джерел тепла, у прохолодному, сухому місці, при температурі від 9 до 25°C.
- Не проковтувати.
- Зберігати в недоступному для дітей місці.
- Не передавати ГІЛАЙС® КЕА іншим особам.
- В'язка структура ГІЛАЙС® КЕА та тривале утримання на поверхні ока може спричинити тимчасову розмитість зору. Переконайтеся, що ви чітко бачите, перш ніж керувати автомобілем або використовувати інструменти чи механізми.
- Перед застосуванням мазі необхідно зняти контактні лінзи; в іншому випадку мазь може призвести до пошкодження поверхні контактних лінз.
- Якщо ви застосовуєте інші очні краплі або мазі, дотримуйтеся інтервалу близько п'ятнадцяти хвилин між застосуванням кожного продукту. Рекомендується застосовувати ГІЛАЙС® КЕА в останню чергу.
- Проконсультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж застосовувати ГІЛАЙС® КЕА під час вагітності та годування груддю.
- Продукт зазвичай рекомендується застосовувати безперервно не більше тридцяти днів поспіль; якщо симптоми не покращуються, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
- Не застосовуйте ГІЛАЙС® КЕА у випадку пошкодження очей.

**Виріб медичного призначення** (С.С. № UA. 101. MD.3.0662-20.00) Виробник: EnTiCi S.p.l., Via Луїджі Рацца 3, 20124 Мілан, Італія (NTC S.r.l., Via Luigi Razza 3, 20124 Milan, Italy)

**Уповноважений представник в Україні:** АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна, 04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38



NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3  
20124 Milano



UA.TR.101

